



HB/HP COMPLEX

TEST PER LO SCREENING DEL CANCRO COLORETTALE E DI ADENOMI DI GRANDI DIMENSIONI

PREPARAZIONE

NON ci sono restrizioni dietetiche. Non prelevare le feci durante il periodo mestruale (o 3 giorni prima/dopo di esso), in caso di emorragie dovute a costipazione, emorroidi emorragiche o in caso di assunzione di farmaci per via rettale. Il test potrebbe risultare erroneamente positivo. Un campione è sufficiente per valutare sia Hb che il complesso Hb/Hp.

ESECUZIONE

1. Evacuare le feci nel foglio di raccolta;
2. Svitare il tappo blu e rimuovere il bastoncino applicatore;
3. Raccogliere il campione inserendo il bastoncino nel campione di feci;
4. Inserire nuovamente il bastoncino applicatore nel tubo di raccolta ed avvitare il tappo blu. Il tubo di raccolta contiene tutti i reagenti necessari.
5. Svitare il tappo bianco e dispensare tre gocce nell'apposita finestrella circolare della card;
6. Leggere dopo 15 minuti.

CONSERVAZIONE

Conservare il campione a temperatura ambiente, in luogo fresco ed al riparo da fonti di luce. I campioni di feci devono essere testati entro una settimana.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Il test permette una doppia osservazione in quanto la card presenta due pozzetti differenti per valutare:

- Emoglobina: normalmente è assente. La presenza unicamente di Hb, può indicare sanguinamento coloretale.
- Complesso Hb/Hp: normalmente è assente.

La presenza unicamente del complesso Hb/Hp, può indicare un coinvolgimento del tratto intestinale superiore.

Il test è considerato "positivo" se compaiono due linee: una in corrispondenza della zona controllo (C) e l'altra nella zona reattiva (T) del test.

L'assenza della linea (C) indica che il test è stato eseguito in maniera scorretta, pertanto il campione va analizzato nuovamente.

Il complesso Hb/Hp è misurato in maniera specifica, per cui non esiste alcuna reattività crociata con l'Hb.

DURATA

15 Minuti

Via Vescovado, 26
84014 Nocera Inferiore (SA)
tel. 081 51 77 334 | info@salusnocera.it
P. IVA IT00279600647